






ÉLIMINATION DES CARIES

Une seule goutte de Papacarie placée sur la carie, **la ramollie en moins d'une minute**. Papacarie permet d'enlever facilement le tissu dentaire carié. **Papacarie n'agit que sur la dentine infectée, laissant la dent saine et intacte.***

En seulement **30 secondes**, sans douleur ni sensibilité, vous pouvez enlever les caries en utilisant seulement un excavateur non tranchant. Dans la plupart des cas, pas besoin d'anesthésie et réduit l'utilisation de turbines.

PLUS DE 300 ARTICLES CLINIQUES PUBLIÉS

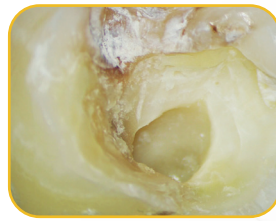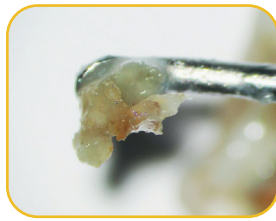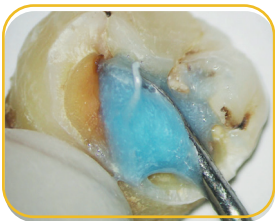

**CONDITIONNEMENT : SERINGUE DE 1 ML
(ENVIRON 25 À 30 APPLICATIONS)**

* "La papaine n'agit que sur la dentine infectée en raison de l'absence d'une antiprotéase plasmatique, l'alpha1-anti-trypsinase, qui empêche son action protéolytique dans les tissus considérés comme normaux"

Gel de papaine : Un nouvel agent chimio-mécanique pour l'élimination des caries. Sandra Kalil et al. Journal of Clinical Pediatric Dent 30 (20) : 115-120, 2005

Réf: PPCDUO
Prix unitaire
109 € TTC


**PRODUIT NATUREL
À BASE DE PAPAÏNE**
IDÉAL POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES
LORSQUE L'ANESTHÉSIE EST PROSCRITE



COMMENT UTILISER PAPACÁRIE ?



Assurez-vous que vous avez un accès visible à la cavité. Appliquez le gel sur la carie.

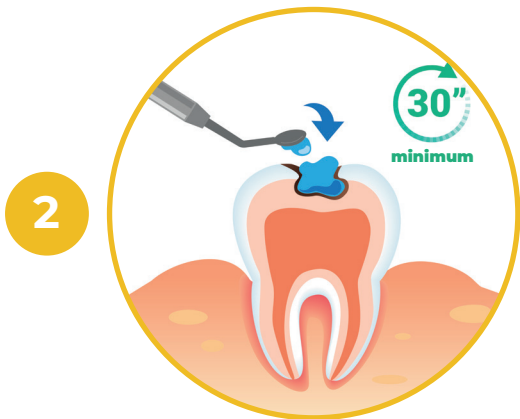


Remplissez la cavité avec PAPACÁRIE et laissez le produit travailler pendant 30 à 60 secondes.



Retirez la dentine carieuse ramollie à l'aide d'un excavateur non tranchant. Dans le cas d'une carie profonde, une deuxième application peut être nécessaire. La surface doit apparaître brillante.

Lorsque l'aspect du gel n'est pas modifié, cela signifie qu'il n'y a plus de tissu infecté.

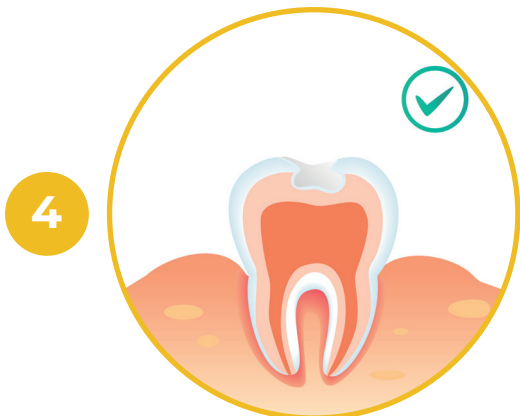

Après le curetage, nettoyez la zone. La surface doit être brillante, dure et décontaminée avant de procéder à la restauration de la cavité. (CVI ou composite bioactif conseillé)

Papacarie permet de retirer uniquement la dentine infectée en laissant la dentine affectée, permettant de préserver au maximum la dent.

IMPORTATEUR: OPSYSE

Distributeur: SDMC

104 Rue de la Pallue

16100 COGNAC

contact@sdmc.fr Tél : 06 65 91 94 83